

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**

Las palabras de aviso definidas identifican todas las instrucciones que son importantes para la seguridad. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños en el extractor de leche. Cuando se las usa con las palabras a continuación, las palabras de aviso definidas significan: **Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.**

Indicaciones de uso	Contraindicaciones
---------------------	--------------------

El extractor de leche Pump In Style® Pro es un extractor de leche eléctrico y lo utilizan mujeres en período de lactancia para extraer la leche de sus senos. El extractor de leche eléctrico está diseñado para una única usuaria. Este extractor de leche está destinado a ser utilizado en un entorno doméstico.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE**

**⚠️ ADVERTENCIA** Puede provocar lesiones graves o la muerte.

- Para evitar incendios, descargas eléctricas o quemaduras graves:**
- No deje el producto sin supervisión cuando esté enchufado a un tomacorriente.
  - Desenchufe siempre los productos eléctricos inmediatamente después del uso.
  - No coloque ni guarde el producto en un lugar donde pueda caerse o ser tirado a una tina o lavamanos.
  - No ponga o deje caer en agua ni otros líquidos.
  - Nunca opere este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
  - Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o tubo.
  - No lo use al aire libre, ni lo haga funcionar donde se utilicen productos inflamables, como aerosoles (spray), o donde se administre oxígeno.
  - Siempre inspeccione los cables del adaptador de corriente y la batería antes de usar para detectar daños o cables expuestos. Si detecta daños, deje de usar el adaptador de corriente o la batería inmediatamente y llame al Servicio al cliente de Medela al 1-800-435-8316.
  - El extractor de leche y los componentes desmontables no son resistentes al calor: manténgalos alejados de superficies calientes o llamas abiertas.
  - No lo use cerca de materiales inflamables.
  - No use un tomacorriente que haya estado expuesto al agua u otros líquidos.
  - No lo use mientras se baña o se ducha.
  - No deje correr agua sobre el extractor de leche.
  - Si un dispositivo ha sido expuesto al agua u otros líquidos, no lo toque, desenchufe el dispositivo del tomacorriente, apáguelo y comuníquese con Medela.

- Para evitar riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones graves:**
- Este es un producto para uso exclusivamente personal. Los extractores eléctricos de leche materna diseñados para una sola usuaria, jamás deben alquilarse o compartirse. Si los usa más de una persona, eso puede representar un riesgo para la salud e invalida la garantía.

- No se sabe de contraindicaciones por el uso con este producto.
- Las mangueras o el cable del adaptador de corriente representan un riesgo de estrangulamiento cuando se juegan con ellos y las piezas pequeñas pueden ser ingeridas por niños. Es necesaria una supervisión cercana cuando el extractor de leche o los accesorios se utilizan en la proximidad de niños.
- No use el extractor de leche mientras conduce un vehículo en movimiento.
- Inspeccione todos los componentes del extractor antes de cada uso.
- Use el producto solo para el uso previsto como se indica en este manual. No utilice accesorios si no los recomienda Medela.
- Extraer leche mientras duerme puede provocar daños en los tejidos.
- Este dispositivo no puede repararse ni realizarse un mantenimiento en él. No lo repare por su cuenta. No modifique el dispositivo ni las piezas.
- Nunca utilice un dispositivo dañado. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas.
- Antes de cada uso, realice una inspección visual a cada componente para detectar grietas, astillas, rasgaduras, decoloración o deterioro. En caso de detectar daños en el dispositivo, deje de usar hasta que se hayan reemplazado las piezas.
- Utilice únicamente las piezas recomendadas por Medela con su extractor de leche.
- La extracción de leche puede inducir el parto. No bombee hasta después del parto. Si queda embarazada durante la lactancia o el bombeo, consulte a un profesional de la salud con licencia antes de continuar.
- Si se produce irritación o molestias, suspenda su uso y consulte a un médico.
- Si padece de hepatitis B, hepatitis C o virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la extracción de leche materna no reducirá ni eliminará el riesgo de transmitir el virus a su bebé a través de la leche materna.
- Limpie y esterilice todas las piezas que entren en contacto con su seno y la leche materna antes del primer uso.
- Lave todas las piezas que entran en contacto con su seno y la leche materna después de cada uso.

**⚠️ PRECAUCIÓN** Puede provocar lesiones leves.

- No enrolle el cable alrededor del adaptador de corriente.
- Conecte el adaptador de corriente en el extractor de leche primero y luego al tomacorriente.
- Nunca ponga el extractor de leche en agua o un esterilizador, esto puede causar daños permanentes al extractor de leche.
- No intente quitar el embudo del conector mientras extrae la leche. Apague el extractor de leche y rompa el sello entre el seno y el embudo con su dedo, luego retire el embudo de su seno.
- Si la extracción es incómoda o causa dolor, apague la unidad, rompa el sello entre el seno y el embudo con su dedo y retire el embudo de su seno.
- Comuníquese con su profesional de salud o con un especialista en lactancia si puede extraer solo un mínimo de leche o si la extracción es dolorosa.
- Si bien puede sentir algo de molestia cuando usa el extractor de leche por primera vez, usar el extractor de leche no debe causar dolor. Para obtener ayuda con el tamaño correcto del embudo y la comodidad, visite [medela.com/fittingguide](http://medela.com/fittingguide) o consulte a un especialista/consultor en lactancia.
- No intente extraer con un vacío que sea demasiado alto e incómodo (doloroso). El dolor, junto con un posible traumatismo en los senos y los pezones, puede disminuir la cantidad de leche que se extrae.
- Asegúrese de que la manguera no esté torcida o pellizcada mientras extrae leche.

- Si se extrae leche a grandes altitudes, incluyendo en un avión, se recomienda extraerse más a menudo o por más tiempo si se siente que queda leche en los pechos después de la sesión de extracción.
- Lávese bien las manos con agua y jabón antes de tocar el extractor de leche, el kit y los senos, evite tocar el interior de las botellas o las tapas.
- Separe y lave todas las piezas expuestas a la leche materna inmediatamente después de usarlas. Esto ayudará a eliminar los residuos de leche materna y evitar el crecimiento de bacterias.
- Siempre inspeccione que estén limpios los embudos, los conectores, las membranas, las botellas, las tapas y la manguera antes de usar.
- Solo use agua de la llave potable o agua embotellada para limpiar el extractor de leche y sus piezas.
- No almacene piezas húmedas o mojadas, se puede formar moho.
- No haga funcionar el extractor si la manguera está húmeda. Hacerlo puede dañar el extractor de leche.
- Si experimenta molestias en la base del pezón debido al roce de su tejido mamario contra el túnel del embudo, un lubricante como la lanolina puede ser de ayuda. Para obtener ayuda con el tamaño correcto del embudo y la comodidad, visite [medela.com/fittingguide](http://medela.com/fittingguide) o consulte a un especialista/consultor en lactancia.

**AVISO** Puede provocar daños materiales.

- NO use limpiadores/detergentes antibacterianos o abrasivos para limpiar el extractor de leche o sus piezas.
- Las botellas y las piezas de los componentes de plástico se vuelven quebradizas cuando se congelan y pueden romperse al caer.
- Las botellas y las piezas de los componentes pueden dañarse si se manipulan mal; por ejemplo, si se caen, se aprietan demasiado o se golpean.

- Tenga cuidado al manejar las botellas y componentes.
- No use la leche materna si las botellas o los componentes están dañados.
- No use el laxo textil con la marca para colgarse el extractor de leche en el cuerpo.



# Pump In Style® Pro

## Extractor de leche eléctrico doble

### Instrucciones de uso




### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este extractor de leche es eléctrico y de uso personal que incluye la tecnología 2-Phase Expression®, con capacidad de extracción simple y doble.

#### Piezas del sistema extractor de leche

No todas las piezas mencionadas se incluyen en todos los modelos de Pump In Style® Pro.

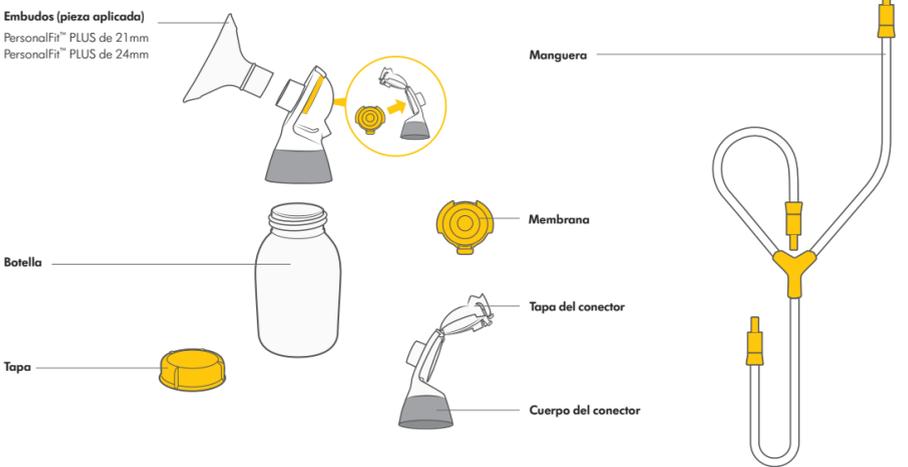

**Otros artículos no mostrados (varían según la configuración del producto):**  
 Adaptador de corriente  
 Bolsa para extractor de leche  
 Paquete para hielo  
 Baza para botella

Pump In Style® Pro es compatible con:

- Conectores, membranas y embudos Medela PersonalFit™ Flex
- Embudos Medela PersonalFit™ PLUS
- Manguera Medela Pump In Style® y manguera manos libres
- Botellas de almacenamiento de leche materna Medela con tapas
- Copas de recolección manos libres Medela y piezas de repuesto asociadas (membranas y embudos)
- Adaptador de corriente Medela Pump In Style® (Artículo 101036149)

### CÓMO ARMAR EL KIT DE SU EXTRACTOR DE LECHE

**AVISO** Puede provocar daños materiales.

- Para evitar daños en el extractor de leche, todos los componentes deben estar completamente secos antes de usar.



- Lávese bien las manos.
- Inserte con cuidado la membrana (amarillo oscuro) con la solapa en la abertura del conector.

→ Asegúrese de que la membrana forme un sello alrededor del borde del conector.



- Cierre la tapa del conector hasta escuchar un clic.

- Enrosque el conector en la botella.

- Empuje con cuidado el embudo en el cuerpo del conector.

→ Seleccione el tamaño de embudo que se adapte a sus necesidades. Para conocer el tamaño adecuado, consulte [medela.com/fittingguide](http://medela.com/fittingguide)



- Los embudos ovalados se pueden rotar (360 °) y colocarlos en la posición deseada para que se adapten mejor a sus necesidades.
- Inserte uno de los extremos cortos de la manguera en la abertura de la tapa del conector.





- Inserte el extremo largo de la manguera en el extractor de leche todo lo que pueda.

#### Cómo hacer la extracción simple



- Inserte el extremo no utilizado de la manguera en el soporte de la manguera.
- Sistema armado correctamente (para extracción simple).

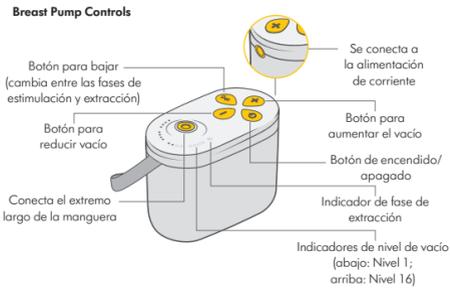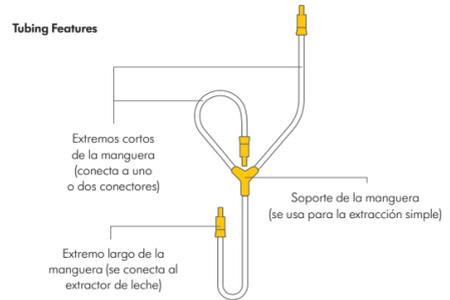


#### Cómo hacer la extracción doble



- Ensamble el segundo kit del extractor de leche.
- Sistema armado correctamente (para extracción doble).

### FUNCIONAMIENTO DE SU EXTRACTOR DE LECHE

#### Preparación para la extracción

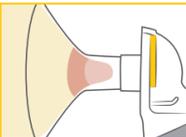

- Lávese bien las manos.
- Asegúrese de usar el tamaño de embudo correcto. Visite [medela.com/fittingguide](http://medela.com/fittingguide) para obtener más información.

- Conecte el kit de su extractor de leche montado en el puerto de la manguera en la parte superior del extractor de leche.
- Asegúrese de que el kit del extractor de leche esté conectado y colocado correctamente.
- Coloque el embudo en el seno de manera que el pezón quede correctamente centrado en el túnel.
- Sostenga el embudo y el conector sobre su seno con el pulgar y el índice.
- Apoye su seno en la palma de su mano.

#### Extracción de la leche

- Encienda el extractor de leche conectando la fuente de alimentación. Pulse el botón de Encendido/Apagado (⏻) para iniciar la extracción.
  - El extractor de leche comienza la fase de estimulación, nivel 3. El indicador de fase de estimulación es anaranjado.
- Ajuste el vacío pulsando los botones Aumentar vacío (⬆️) y Disminuir vacío (⬇️) para encontrar su Maximum Comfort Vacuum. Los indicadores de nivel de vacío reflejarán tu nivel de vacío actual con luces LED blancas.
- Si su leche comienza a fluir y el extractor aún no ha cambiado a la fase de extracción, presione el botón Bajar (⬇️). Al presionar este botón, el extractor cambia de la fase de estimulación a la fase de extracción.
  - Su extractor cambiará automáticamente a la fase de extracción después de un minuto de extracción. El indicador de fase de extracción es blanco.
  - Cuando el extractor está en fase de estimulación, el indicador de modo de bombeo empezará a parpadear antes de cambiar a la fase de extracción.
- Es posible que tenga que ajustar el vacío pulsando los botones Aumentar vacío (⬆️) y Disminuir vacío (⬇️) para encontrar su máximo confort de vacío. Los indicadores de nivel de vacío mostrarán el nivel de vacío actual.
- Cuando termine su sesión de extracción, presione el botón Encendido/Apagado (⏻) en el extractor de leche para detener la operación de extracción.

#### Después de la extracción

Si no presiona ningún botón durante 30 minutos, el extractor se apagará solo.

#### Prepare su leche para el almacenamiento:

- Use la base de la botella (si la tiene) para evitar que se caiga.
- Para obtener información sobre cómo almacenar su leche, visite [medela.com/storing-and-thawing](http://medela.com/storing-and-thawing)
- Retire la manguera de la tapa del conector y del extractor de leche.
- Guarde la manguera en una bolsa/contenedor limpio.
  - No enrolle la manguera alrededor del extractor de leche.

#### Encuentre su Maximum Comfort Vacuum

El máximo vacío de confort es el mayor nivel de vacío con el que la extracción aún es cómoda

- Una vez que esté bombeando en la fase de extracción, aumente el vacío con el botón (⬆️) hasta que la extracción sea un poco incómoda (no dolorosa).
- Luego disminuya ligeramente el vacío presionando una vez el botón (⬇️)

### Información útil

- La estimulación debe estar en un nivel de vacío cómodo, no es necesario extraer a un nivel demasiado alto.
- Vuelva a evaluar su vacío de confort máximo a medida que experimenta la extracción. Esto puede cambiar a lo largo de cada etapa de la lactancia.

#### Glosario

**Tecnología 2-Phase Expression®:** tecnología basada en la investigación que imita el ritmo natural de lactancia de un bebé.

**Fase de estimulación:** ritmo de succión/extracción rápida para estimular el reflejo de eyección de la leche para que comience a fluir.

**Bajar:** cuando la leche empieza a fluir.

**Fase de extracción:** ritmo de succión/extracción mas lento para una extracción suave y eficiente lo mas rapido posible.

**Maximum Comfort Vacuum™:** el nivel de vacío mas alto con el que una madre se siente cómoda durante la extracción. Esto es diferente en cada madre.

PID:1009\_s1; Project Name: BF Twin PNS Pro MLLC CC MLLC-01000 IFU ES B Quick Flow Artwork

Item:1, Cycle:1; 15400287\_B\_0425\_Pump\_In\_Style\_Pro\_IFU\_ES\_043025v2\_low.pdf; Status:Approved

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
En caso de que se produzca un comportamiento inesperado del extractor de leche, consulte la tabla de solución de problemas. Si encuentra el problema en la columna «Problema», siga las instrucciones ofrecidas en la columna «Solución».	
Problema	Solución
<b>El extractor de leche no genera vacío (el motor no funciona) después de presionar el botón de Encendido/Apagado</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Asegúrese de que el extractor de leche esté conectado a una fuente de alimentación.</li> <li>Si aún así no funciona, comuníquese con el Servicio al cliente de Medela.</li></ul>
<b>Hay poca o nada de succión</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Asegúrese de que todos los componentes del kit del extractor de leche estén limpios y secos y que las conexiones estén seguras.</li> <li>Asegúrese de que las membranas estén bien colocadas en las tapas de los conectores y que las tapas de los conectores estén bien cerradas.</li> <li>Asegúrese de que los embudos estén bien apretados en las tapas de los conectores.</li> <li>Mientras extrae leche, asegúrese de que los embudos formen un sello completo alrededor del seno.</li> <li>Cuando realice la extracción simple, asegúrese de que el extremo de la manguera que no se utiliza esté enchufado correctamente en su soporte.</li> <li>Si la succión no mejora, comuníquese con el Servicio al cliente de Medela.</li></ul>
<b>El exterior del extractor de leche se mojó</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Desenchufe el extractor de leche de la fuente de alimentación y apáguelo.</li> <li>Seque el exterior del extractor de leche.</li></ul>
<b>El extractor de leche ha sido sumergido en agua</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Desconecte el extractor de leche de la fuente de alimentación.</li> <li>Comuníquese con el Servicio al cliente de Medela.</li></ul>

Si no ha resuelto el problema con su extractor de leche, tiene más preguntas o necesita asistencia adicional fuera de la tabla de solución de proble- mas, por favor contacte al servicio de atención al cliente de Medela. Además, para reportar cualquier operación o evento inesperado, por favor contacte al servicio de atención al cliente de Medela. Para obtener los datos de contacto, visite www.medela.cm/contact-us. En “País” elija su país.

## DESECHO

La unidad se fabrica con varios metales y plásticos. Antes de desecharlo, el dispositivo debe quedar inutilizable y no debe tirarse en la basura municipal sin clasificar de acuerdo con los reglamentos locales. Use su sistema local de devolución y recolección de residuos de equipos eléctri- cos y electrónicos. Si no se desecha de la forma adecuada, puede tener efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud pública.

## GARANTÍA

Este producto tiene la garantía de Medela para el comprador minorista origi- nal de estar libre de defectos en el material y la mano de obra por el período de un año para el mecanismo del extractor (90 días para las piezas y compo- nentes extraíbles) a partir de la fecha de compra. La garantía solo puede ser reclamada en el país de compra. En caso de un defecto, Medela reparará o, a consideración de Medela, reemplazará este producto, sin cargo alguno por dicho reemplazo, piezas o mano de obra. El comprador deberá asumir todos los gastos para devolver este producto a Medela. Esta garantía no se aplica a ningún producto utilizado de forma comercial o que haya sido objeto de mal uso, abuso o alteración.

CUALQUIER Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁN LIMITADAS A UNA DURACIÓN DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE EL PLAZO DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAM- BIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS			
	Este símbolo indica el fabricante. <sup>1</sup>		Este símbolo indica el código de lote del fabricante. <sup>15</sup>
	Este símbolo indica que no desheche el dispositivo junto con la basura municipal sin clasificar (de acuerdo con los reglamentos locales). <sup>2</sup>		Este símbolo indica el número de serie del dispositivo. <sup>16</sup>
	Este símbolo indica el cumplimiento de los requisitos internacionales de protección contra descargas eléctricas (piezas aplicadas Tipo BF). <sup>3</sup>		Contiene productos frágiles, manipúelos con cuidado. <sup>17</sup>
<b>IP21</b>	Protegió contra objetos ≥12,5 mm. Protegió contra el agua que gotea verticalmente. <sup>4</sup>		Mantener alejado de la luz solar. <sup>18</sup>
<b>IP22</b>	Protegió contra objetos ≥12,5 mm. Protegió contra el agua que gotea inclinada. <sup>4</sup>		Mantener seco. <sup>19</sup>
	Este símbolo indica la fecha de fabricación. <sup>5</sup>		Define el rango de temperatura. <sup>20</sup>
	Este símbolo indica que el dispositivo es un aparato eléctrico de Clase II (doble aislamiento). <sup>6</sup>		Define un rango de humedad relativa. <sup>21</sup>
	Este símbolo indica que el adaptador de corriente es solo para uso en interiores. <sup>7</sup>		Define un rango de presión atmosférica. <sup>22</sup>
	Este símbolo indica corriente alterna. <sup>8</sup>		Consulte las instrucciones de uso. <sup>23</sup>
	Este símbolo indica corriente directa. <sup>9</sup>		Indica que el paquete es reciclable. <sup>24</sup>
	Señal de precaución. <sup>10</sup>		MÉDICO – EQUIPO MÉDICO GENERAL EN CUANTO A CHOQUE ELÉCTRICO, INCENDIO Y PELIGROS MECÁNICOS SOLAMENTE [AAMI ES60601-1:2005/[R]2012 y A1:2012/[R]2012 y A2:2021], CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 [Reafirmado 2022], IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 +AMD2:2020, e IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020.]*
	Señal de advertencia general. <sup>11</sup>		Certificación NOM*
	Este símbolo indica la ubicación del botón de encendido/apagado (en espera). <sup>12</sup>		Símbolo de “alimento seguro” según el Reglamento Europeo CE 1935/2004*
<b>REF</b>	Este símbolo indica el número de catálogo del fabricante. <sup>13</sup>		
<b>FC</b>	Indica el cumplimiento de los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones. <sup>14</sup>		

\* Estos símbolos no se derivan de las normas.

## REFERENCIAS

- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.1.1 Manufacturer
- EN 50419:2022 Marking of electrical and electronic equipment (EEE) in respect to separate collection of waste EEE (WEEE)
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 20 Type BF applied parts
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.3 Symbol 2 IP Code, IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.1.3 Manufacturing Date
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 9 Class II equipment
- IEC 60417-5957, Graphical symbols for use on equipment, For Indoor use only
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 1 Alternating current
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 4 Direct current
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment - Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 10 Caution.
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.2 Symbol 2 General Warning Sign
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 29 Stand-by

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA CEM (COMPATIBILIDAD ELECTRÓNICA)

El extractor de leche requiere de precauciones especiales con respecto a EMC y debe instalarse y ponerse a funcionar según la información de EMC proporcionada en las instrucciones de uso. Las comunicaciones de RF portátiles y teléfonos móviles pueden afectar el extractor de leche.

AVISO	<i>Puede provocar daños materiales.</i>
-------	---

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
- Este dispositiivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un Dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una o más de los medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas		
Este extractor de leche está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o quien usa el extractor de leche deben asegurarse de que se use en dicho entorno.		
Pruebas de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
<b>Emisiones de RF CISPR 11</b>	Grupo 1	El extractor de leche utiliza energía de RF solo para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no hay probabilidad de que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
<b>Emisiones de RF CISPR 11</b>	Clase B	
<b>Emisiones armónicas IEC 61000-3-2</b>	No aplica	El extractor de leche es adecuado para usarse en todo tipo de establecimiento, incluidos los establecimientos domésticos y aquellos directamente conectados a la red pública de suministro de energía de bajo voltaje que abastece a los edificios utilizados para fines domésticos.
<b>Fluctuaciones de voltaje/emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3</b>	No aplica	
ADVERTENCIA:		
<ul style="list-style-type: none"><li>Este extractor de leche no debe utilizarse ni debe pilarse con otro equipo. Si es necesario el uso adyacente o apilado, debe observarse el extractor de leche para verificar el funcionamiento normal en la configuración en la que se utilizará.</li> <li>El uso de accesorios o cables que no sean los proporcionados por Medela podría aumentar las emisiones electromagnéticas o disminuir la inmunidad electromagnética de este equipo y provocar mal funcionamiento.</li></ul>		

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética	
Este extractor de leche está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o quien usa el extractor de leche deben asegurarse de que se use en dicho entorno.	
El extractor de leche Pump In Style® Pro no tiene un rendimiento esencial, pero su inmunidad está probada ante las perturbaciones electromagnéticas y se aprobó con los siguientes criterios::	

Prueba de inmunidad	IEC 60601 nivel de prueba	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
<b>Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2</b>	+/- 2kV, +/- 4kV, Descarga de contacto de +/- 6 kV, +/- 8kV +/- 2kV, +/- 4kV, +/- 6 kV, +/- 8kV, Descarga de aire de +/- 15 kV	+/- 2kV, +/- 4kV, Descarga de contacto de +/- 6 kV, +/- 8kV +/- 2kV, +/- 4kV, +/- 6 kV, +/- 8kV, Descarga de aire de +/- 15 kV	Los pisos deben ser de madera, concreto o de cerámica. Si los pisos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos 30 <span> </span> %.
<b>Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas IEC 61000-4-4</b>	± 2 kV Frecuencia de repetición de 100 kHz	± 2 kV Frecuencia de repetición de 100 kHz	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario normal.
<b>Sobretensión IEC 61000-4-5</b>	± 0,5 kV, ± 1 kV Línea a línea	± 0,5 kV, ± 1 kV Línea a línea	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario normal.
<b>Caidas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11</b>	0 <span> </span> % U <sub>n</sub> ; 0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, y 315°	0 <span> </span> % U <sub>n</sub> ; 0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, y 315°	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario normal. Si requiere que el extractor de leche funcione de forma constante durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda conectarlo a una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.
<b>Frecuencia de corriente (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8</b>	30 A/m, 50 o 60 Hz	30 A/m, 50/60 Hz	Podría ser necesario colocar el extractor de leche más lejos de las fuentes de campos magnéticos de frecuencia de corriente o instalar un blindaje magnético. El campo magnético de frecuencia de corriente se debe medir en la ubicación de instalación prevista para asegurar que sea lo suficientemente bajo.
<b>NOTA:</b> U <sub>n</sub> es la corriente alterna para la tensión de red antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética (cont.)
Este extractor de leche está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o quien usa el extractor de leche deben asegurarse de que se use en dicho entorno.

Tabla de frecuencias de transmisores portátiles y móviles para los cuales la distancia de separación recomendada es de 30 cm (12 pulgadas):

Banda (MHz)	Servicio
380 - 390	TETRA 400
430 - 470	GMRS 460, FRS 460
704 - 787	BANDA LTE 13, 17
800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, BANDA LTE 5
1 700 - 1 990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; BANDA LTE 1, 3, 4, 25; UMTS
2400 - 2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, BANDA LTE 7
5 100 - 5 800	WLAN 802.11 a/n

**ADVERTENCIA:** Los equipos de comunicaciones de RF portátiles (incluidos los periféricos, como los cables de antena y las antenas externas) no deben usarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier pieza del extractor de leche  incluidos los cables especificados por Medela. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
<p>La vida útil de este extractor de leche se define en aproximadamente tres sesiones de 15 minutos por día, durante un año. La vida útil del kit del extractor de leche es de 6 meses.</p>						
<p><b>Rango de vacío</b> -50 a -295 mmHg<sup>1,2</sup> 35 a 120 cpm</p>						
<p><b>Modo de operación:</b> Continuo</p>						
<p><b>Tamaño (Unidad de extractor de leche)</b> 140 x 77 x 111 mm</p>						
<p><b>Peso (Unidad de extractor de leche)</b> 1.23 lbs (560 g)</p>						
<table> <tbody><tr> <td colspan="2">Adaptador de corriente</td></tr> <tr> <td>Corriente de entrada</td> <td>Corriente de salida</td></tr> <tr> <td>100-240V~ 50/60 Hz 0.7A máx</td> <td>9.0 VDC 2A</td></tr> </tbody></table>	Adaptador de corriente		Corriente de entrada	Corriente de salida	100-240V~ 50/60 Hz 0.7A máx	9.0 VDC 2A
Adaptador de corriente						
Corriente de entrada	Corriente de salida					
100-240V~ 50/60 Hz 0.7A máx	9.0 VDC 2A					
<p><b>Grado de protección de entrada:</b> IP22 (Unidad de extractor de leche) IP21 (Adaptador de corriente)</p>						
<p><b>Materiales que tocan la piel o entran en contacto con la leche</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Embudo: Polipropileno</li> <li>Conector: Polipropileno</li> <li>Membrana: Silicona</li> <li>Botella: Polipropileno</li> <li>Tapo: Polipropileno</li></ul>						

Todas las piezas que entran en contacto con la leche materna están hechas sin BPA (Bisfenol A).

	Temperatura de funcionamiento (5 °C a 40 °C) (41 °F a 104 °F)
	Temperatura de transporte/almacenamiento (-25 °C a 70 °C) (-13 °F a 158 °F)
	Humedad de transporte/funcionamiento/almacenamiento 15% a 93%
	Presión de operación/transporte/almacenamiento 70kPa a 106kPa

<sup>1</sup>Vacío máximo en extracción (al realizar la extracción simple o doble).  
<sup>2</sup>En condiciones normales, el extractor de leche Pump In Style® Pro es capaz de producir niveles de vacío de -50 a -240 mmHg. En condiciones de uso con límites previsibles que producen vacíos máximos de la mayor magnitud, el extractor podría producir vacíos de -295 mmHg

<p>La apariencia del contenido puede ser diferente a las imágenes.</p> <p>La marca y el logotipo de Medela, Pump In Style, y 2-Phase Expression están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. y en la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá. The Science of Care, Turning Science into Care y PersonalFit son marcas registradas de Medela.</p> <p>15400287 B 0425 © 2025 Medela 101047265</p>	
<p>Medela LLC 1101 Corporate Drive McHenry, IL 60050 USA Phone (800) 435-8316 or (815) 363-1166 customer.service@medela.com www.medela.us</p>	